


PROTOCOLE D'UTILISATION

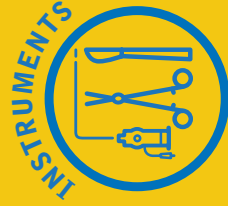

> AVANT DE COMMENCER

Mettre des gants appropriés.

> MODE D'EMPLOI

Dilution à 0,5 %.

Temps de contact :
5 minutes.

> ATTENTION

- Renouveler le bain de nettoyage après chaque utilisation.

Circulaire n° 138 du 14 mars 2001.

- Aniosyme PLA II est un produit alcalin : éviter le contact avec des instruments comportant des éléments en cuivre, laiton, aluminium.
- Conserver à température ambiante et à l'abri de l'humidité.
- Précautions d'emploi : se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette. Produit classé selon la Directive Européenne «préparations dangereuses» 1999/45/CE.

> PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide :**
(NF EN 1040, pr EN 13727, NF T 72-170).
- **Fongicide :**
(NF EN 1275) *Candida albicans*.
- **Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle de l'Hépatite B), Herpès Virus et Rotavirus.**

Aniosyme PLA II




Aniosyme PLA II est une poudre tri-enzymatique pour le nettoyage et la pré-désinfection des instruments médico-chirurgicaux, des dispositifs médicaux et des endoscopes. Il est notamment recommandé pour les nettoyages difficiles et le nettoyage en cuve à ultrasons. Indispensable avant toute phase de stérilisation de vos instruments, pour éliminer les souillures organiques et minérales, Aniosyme PLA II permet de vous protéger ainsi que vos patients des risques de contamination.



0459



1 Versez une cuillère (25 g) ou le contenu d'un sachet d'Aniosyme PLA II dans 5 L d'eau tiède.

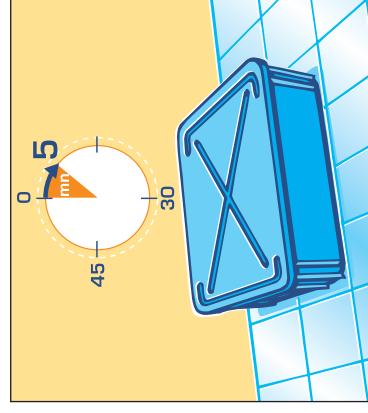

2 Immergez totalement les instruments. Le temps de trempage optimal pour une efficacité microbiologique (bactéries, levures, moisissures et virus) est de 5 minutes.



3 Brossez si nécessaire afin d'éliminer toutes les souillures visibles.



4 Rincez soigneusement sous eau courante.



5 Essayez avec un champ propre.



**Laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes • France
Tél. 03 20 67 67 60 - Fax : 03 20 67 76 59
<http://www.anios.com>

