

MODE D'EMPLOI DOIGTIERS

DOIGTIERS ROULES EN LATEX

EXIGENCES CE

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

NOTICE UTILISATEUR

Prendre un doigtier et le dérouler sur le doigt en l'enfilant complètement du côté légèrement poudré.

Après utilisation l'enrouler de nouveau en partant de la base et le jeter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Prendre la taille adéquate et ne pas forcer.
 - Risque de perçage dans le cas d'ongle pointu.
 - Ne pas réutiliser risque de contamination croisée.
 - Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes : niveau de protection insuffisant
 - Ne peut être utilisé que pour les orifice
 - Dispositif à usage unique, non stérile.
-