



1- Déplier les pieds **1** et **2**

2- Bloquer les pieds **1** et **2** à l'aide des 4 vis **4 (M8x50)** et serrer avec les 4 écrous **6 (M8)**

3- Insérer l'entretoise **3** sur les pieds **1** et **2**

4- Fixer l'entretoise **3** avec les 2 vis **5 (M8x40)**

5- Insérer le porte rouleau **7**

Revision	DESCRIPTION	DATE	DESSINÉ PAR
B	MAJ	29/08/12	FM
 <h2 style="margin: 0;">ECOMAX DIVAN ECOMAX</h2>			
Traitement de surface:	Matière:	Echelle: 1:20	
Toute utilisation non autorisée reste interdite. CE PLAN EST LA PROPRIETE DE CARINA			