


INSTALLATION DU SECOND CONNECTEUR POUR SONDE SUR MINDRAY DP10 ET DP20

Le second connecteur pour sonde est toujours livré séparément.

Procédure à suivre :

Pour installer le second connecteur sur l'échographe, suivre la procédure suivante :

- Retirez le capot arrière de l'échographe.
- La prise de sonde 2 est située proche de la prise de sonde 1 (voir visuel ci-dessous).

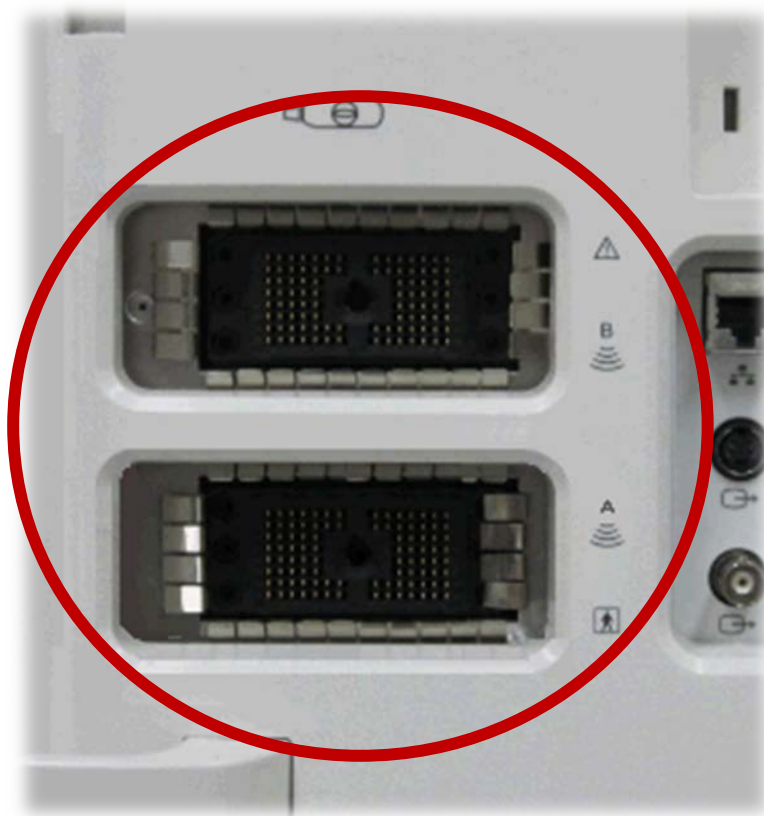

- Initialement, la prise 2 est obturée par un cache. Retirer le cache.
- Insérer la pièce reçue.