



DOCUMENT EXPLICATIF

Comment choisir son fauteuil ou divan d'examen ?

Parce que les catalogues des fabricants ou des boutiques en ligne vous proposent un choix de plus de plus vaste en termes de mobilier médical, il est parfois complexe de sélectionner la table d'examen la plus appropriée à la fois à votre discipline mais aussi à votre environnement de travail ainsi qu'à votre patientèle.

Un divan de consultation est composé d'un matelas en mousse recouvert de similicuir, soutenu par un piètement le plus fréquemment constitué de métal.

La personnalisation des divans est possible par le choix notamment du coloris de la sellerie et de diverses options. Chaque fabricant vous offre en effet la possibilité de choisir la couleur de votre sellerie parmi un large panel de nuances, mais il vous propose également des accessoires pratiques et fonctionnels pour équiper votre mobilier.

Quel divan est fait pour vous ?


Le meilleur moyen de répondre à cette question est de s'interroger :

- Quelle est votre spécialité médicale ?
- Quel est votre budget ?
- Y'a-t-il une marque que vous souhaitez privilégier ?
- Avez-vous besoin d'un divan fixe ou à hauteur variable ?
- Quel est l'espace disponible dans votre salle de consultation ?
- Pour davantage de confort de travail, y-a-t-il des accessoires que vous souhaitez intégrer au mobilier ?
- etc ...

Points abordés dans le document :

- Présentation rapide
- Les divans par type : fixes, électriques ou hydrauliques
- Les divans spécialisés
- Le choix des accessoires
- Conseils de choix en fonction de votre profession

Quels sont les différents types de divans d'examen ?

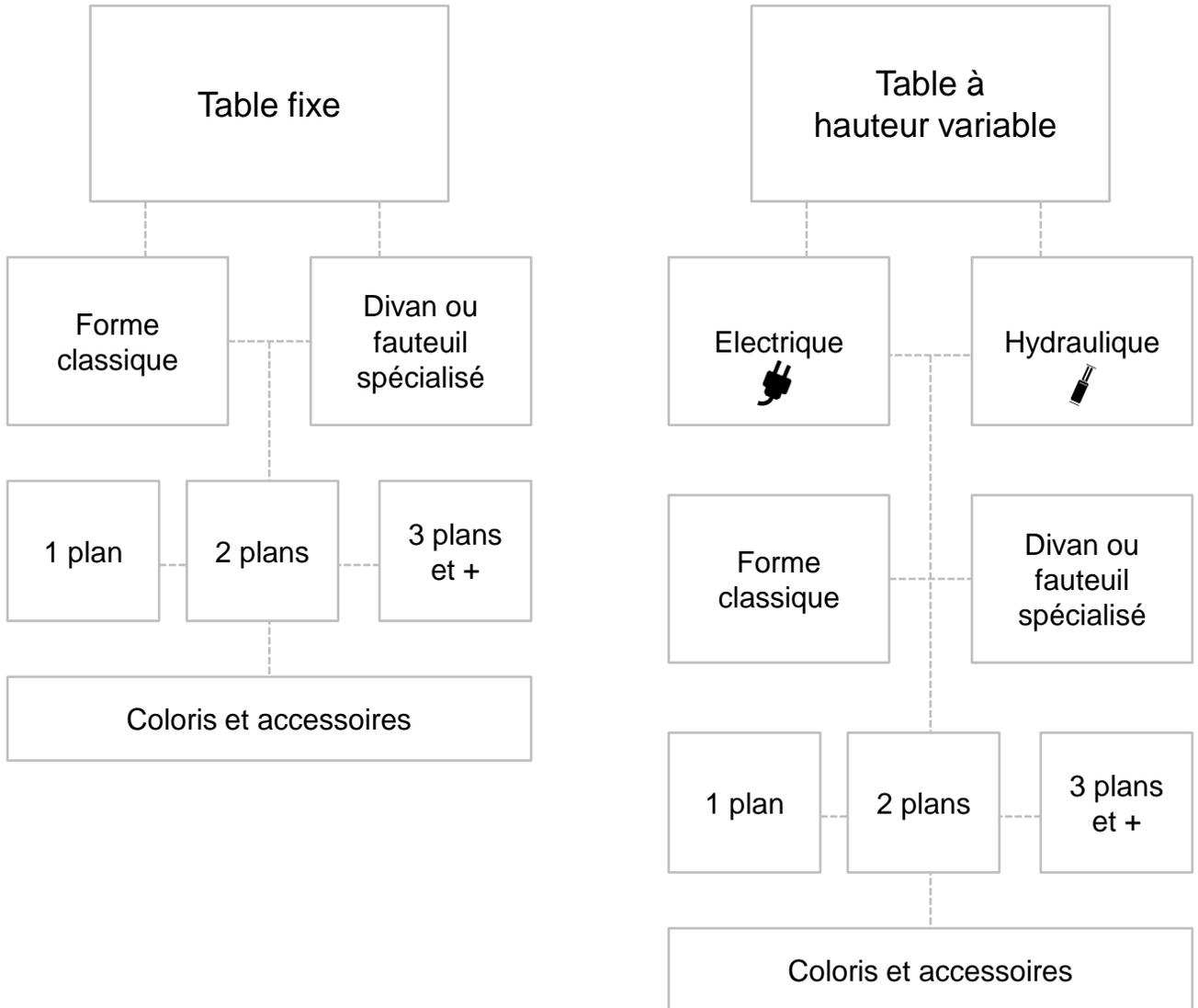

Il est entendu par « forme classique » le divan standard à deux plans (assise et dossier) principalement utilisé en médecine générale, et par « divan ou fauteuil spécialisé », du mobilier particulier pour la gynécologie, l'ORL, etc...

On appelle « plan(s) » les parties planes du divan recouvertes de sellerie, c'est-à-dire l'assise, le dossier, et pour certains divans, la partie jambière ou toute autre partie semblable supplémentaire.

Les 3 types de piètement

Le piètement est la structure de soutien de la table d'examen. Principalement constitué en tubes d'acier mécanosoudés, il est décliné en 3 versions différentes.


Les divans fixes

Ce sont des mobiliers sur lesquels la hauteur de l'assise est inchangeable. Leur piètement est 100% immobile et fixe. Ces tables sont l'équipement de base pour tout local médical.

+ basique mais pratique

- immobile

Conseil pratique : Equipez vous d'un marchepied pour aider vos patients à s'installer !

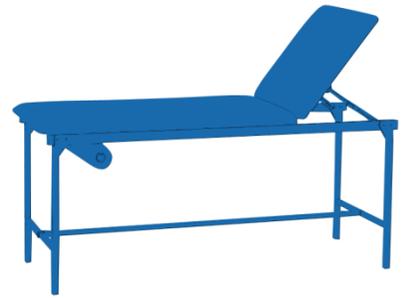

Les divans électriques

Le piètement du divan intègre un moteur qui doit être alimenté en énergie par une prise secteur. Le moteur permet d'élever ou de baisser la hauteur de l'assise, à l'aide d'une télécommande manuelle ou d'une pédale.

+ simple et fonctionnel

- doit être impérativement mis en place près d'une prise

Conseil pratique : Intégrez une commande périphérique sur la base du divan



Les divans hydrauliques

Le piètement du divan intègre un vérin hydraulique qui permet au médecin d'élever ou baisser l'assise en appuyant avec son pied sur un levier mécanique.

+ Economique et écologique

- Intervention physique du praticien médical





Médecine générale : la majeure partie des divans d'examen fixes, électriques ou hydrauliques à deux plans sont parfaitement adaptés et conçus pour les consultations et soins de médecine générale.



Gynécologie : il existe une multitude de divans de consultation et de fauteuils médicaux à 3 plans spécifiquement étudiés pour les cabinets de gynécologues. Ils intègrent pour la plupart dans la configuration standard une paire d'étriers en inox ou une paire d'appui-jambes.



Prélèvement : destinés principalement aux laboratoires d'analyses médicales, ces fauteuils sont dotés, de série, d'appuis-bras confortables, particulièrement utiles pour les prises de sang.



ORL : La partie du corps du patient étudiée dans cette discipline est la tête, ce qui implique l'utilisation d'un fauteuil particulièrement stable avec un coussin cervical fournissant confort et maintien optimal au patient. De nombreux fabricants commercialisent des fauteuils spécifiquement dédiés aux cabinets d'oto-rhino-laryngologie.



Kinésithérapie et ostéopathie : il existe une gamme de divans exclusivement réservés à ces professions paramédicales avec du mobilier très stable et robuste, doté d'une sellerie plus large que les modèles basiques.



Pédiatrie : Le mobilier est adapté à la morphologie des patients, c'est-à-dire que les divans ont des dimensions plus réduites que du mobilier d'examen standard, tout en fournissant le même confort.



Podologie : Ces fauteuils sont dotés de plans indépendants et réglables pour le positionnement des jambes du patient.



Les accessoires

- Porte rouleau pour draps d'examen
- Etriers ou appui-jambes pour pratique de la gynécologie
- Pédale de commande au lieu de la commande manuelle ou inversement
- Commande périphérique (commande au pied accessible de tous les cotés du divan et qui est mise en place directement sur les barres horizontales du piètement)
- Repose-bras pour prélèvement sanguins
- Protection transparente en PVC pour partie pieds
- Appui-tête et coussins
- Roulettes pour déplacement du divan à vide.
- Barrières de sécurité
- Plateau pour instrumentation, fixation directement sur la structure du divan.



Les options



- Sellerie spéciale : certains modèles de matelas optionnels sont plus confortables que les selleries standards. Ils se déclinent en divers types : densité plus élevée, sellerie à bourrelets ou anatomique, ou encore sans coutures apparentes...
- Coloris spécial : certains fabricants définissent des coloris standards et des coloris spéciaux ou premiums. Ces derniers sont susceptibles d'impacter à la fois le prix final du divan mais aussi le délai de disponibilité.
- Prestation de livraison et installation : il est important de souligner qu'en standard, la livraison du divan d'examen se fait systématiquement en pas de porte. Si vous souhaitez un service plus haut en gamme, un forfait spécial de livraison installation est commandable en ligne. Le prix varie selon la nature de la prestation à réaliser et le poids du mobilier.

Cabinet de médecine générale

- 
- 1 divan d'examen électrique ou hydraulique
 - 1 porte rouleau
 - 1 coussin cervical
 - 1 paire d'étriers amovibles en cas de besoin

Salle de consultation de gynécologie

- 
- 1 fauteuil de gynécologie avec appui-jambes ou étriers
 - 1 porte rouleau
 - 1 paire de repose bras
 - 1 commande au pied ou commande périphérique

Salle de prélèvement

- 
- 1 fauteuil de prélèvement à hauteur variable avec 2 appuis-bras.
 - 1 porte rouleau
 - 1 paire d'étriers pour les prélèvements gynécologiques
 - 1 protection transparente en PVC pour partie pieds

Infirmierie ou salle de consultation hospitalière

- 
- 1 divan d'examen fixe
 - 1 porte rouleau
 - 1 marchepied

Kinésithérapie / ostéopathie

- 
- 1 table électrique de bobath ou autre modèle dédié
 - 1 commande périphérique
 - 1 sellerie spéciale haute densité

Pédiatrie

- 
- 1 divan d'examen pédiatrique électrique à 3 plans
 - 1 porte rouleau

Bas âge

- 1 divan d'examen pédiatrique à hauteur fixe à 1 plan

Besoin de simplicité ?

Il existe des packs cabinets complets qui intègrent à la fois un divan d'examen fixe, un guéridon et/ou un marchepied, ainsi qu'un tabouret. Ils couvrent majoritairement les domaines de la gynécologie et de la médecine générale.