

MODE D'EMPLOI DU PESE-BEBE BABYCOMED

REF. : 45 730 55

Nous vous remercions d'avoir choisi notre modèle de pèse-bébé et sommes certains que son usage vous donnera entière satisfaction.


Veuillez lire le mode d'emploi avant la 1^{ère} utilisation et le conserver.

Enlever le film protecteur de l'écran.

1/ CARACTERISTIQUES :

- portée : 20 kg
- graduation : 5 g
- poids minimum : 100 g
- précision : +/- 15 g
- unités de mesure : kg/lb
- indication de batterie faible « lo »
- indication : « O-ld » quand le poids dépasse 20,10 kg
- indication : « UnST » quand la position du pèse-bébé n'est pas stable
- batterie : 4 piles AA = LR6
- fonction arrêt automatique après 60 secondes de non-utilisation
- 35 mélodies au choix
- température idéale pour la mesure : 10 – 40 °C
- indication de la température ambiante
- température de stockage : - 10 – 50 °C
- écran LCD rétro-éclairé bleu

2/ FONCTIONS PRINCIPALES :

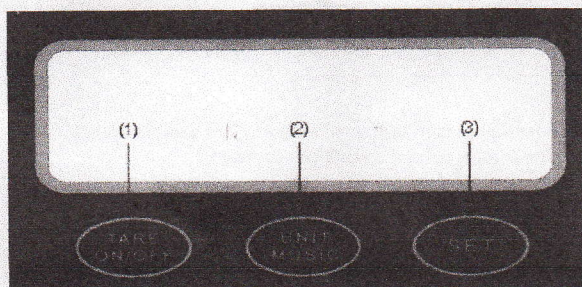

a) ON/OFF/TARE (1)

- Allumer le pèse bébé en appuyant sur le bouton «ON/OFF/TARE »
 - Appuyer sur (1) pour mettre le pèse-bébé à « 0.000 »
 - Appuyer pendant plusieurs secondes pour éteindre le pèse-bébé.
- Le pèse-bébé s'éteint automatiquement en cas de non-utilisation pendant 30 secondes

b) UNIT (2)

- presser le bouton « UNIT » pendant quelques secondes pour changer l'unité de mesure de kg en lb
- presser le bouton « UNIT » pour allumer la musique et appuyer pour changer de mélodie

c) SET (3)

En appuyant sur le bouton « SET » vous obtenez, en 3 secondes, le dernier poids mesuré
En ré-appuyant, vous obtenez les 10 derniers poids mesurés.

3/ FONCTIONS SPECIFIQUES :

a) TARE :

Si le pèse bébé n'est pas à « 0 » lors de l'allumage, appuyer 2 secondes sur « le bouton « ON/OFF/TARE »

b) PESEE :

Veuillez à ce que le pèse bébé soit sur une surface plane.

Bien mettre le bébé en position couchée ou assise, bien au milieu du plateau et éviter qu'il ne bouge trop.

Dès que la mesure est validée, la musique retentit.

Une nouvelle mesure est possible dès l'arrêt de la musique.

c) FONCTION MUSICALE :

Pour changer de mélodie, appuyer sur « UNIT » jusqu'à obtention de la mélodie souhaitée.

Choix de 35 mélodies différentes.

Pour enlever la fonction musicale :

Quand la balance est éteinte, appuyer sur « SET » puis sur « ON/OFF/TARE » en restant sur « SET ».

Sur l'écran apparaît « On » ou « OFF », appuyer sur « SET » pour sélectionner

« On » = musique

« OFF » = pas de musique

d) CHANGEMENT D'UNITE DE MESURE DE LA TEMPERATURE

Lors de l'allumage, lorsque l'écran indique « 88888 » appuyer sur « UNIT » pour passer de F en °C et inversement.

e) ARRET AUTOMATIQUE :

Après 15 secondes de non-utilisation, le rétro-éclairage en bleu s'éteint et le fond d'écran devient noir.

Après 60 secondes de non-utilisation, le pèse-bébé s'éteint complètement.

4/ UTILISATION :

Ouvrir l'emballage et placer les 4 piles dans leur compartiment placé sous la balance.

Veuillez à bien mettre les piles comme indiqué dans le compartiment.

Mettre la balance sur une surface droite et plane.

Attention : toujours surveiller le bébé pendant la pesée.

Ne pas nettoyer le plateau de pesée avec un liquide corrosif.

Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.

5/ GARANTIE :

1 an

Importé par :



8 RUE LOUISE MICHEL

67200 STRASBOURG

TEL : 03.88.77.13.00

FAX : 03.88.77.00.70

info@comed.fr

www.comed.fr

