



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403

Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056


gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

BARELLA A CUCCHIAIO SCOOPING STRETCHER CIVIÈRE DE RELEVAGE CAMILLA A CUCHARA SCHAUFELTRAGHE MACA TIPO CONCHA

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation

Manual de uso - Gebrauchsanweisung - Guia para utilização

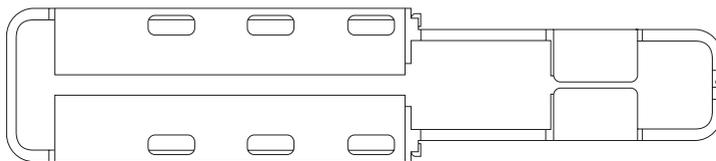

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

REF 34103



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in China



Fig. 1


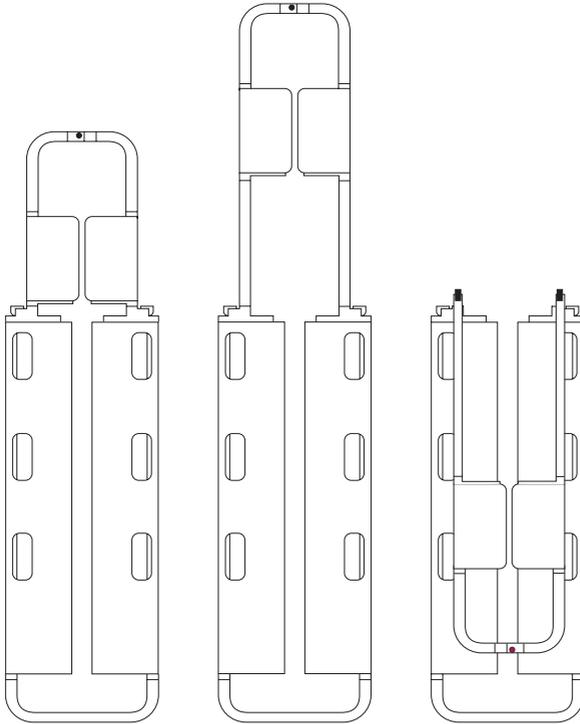


Fig. 2

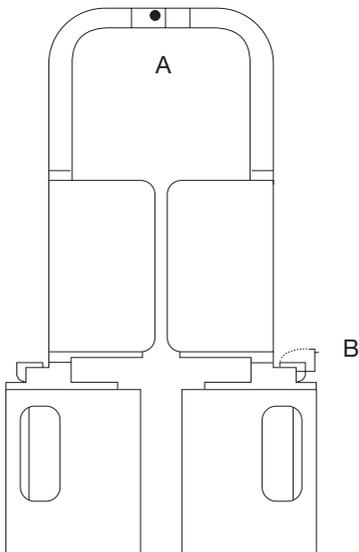

SPECIFICATIONS

DIMENSIONES	
Longitud extension min	mm. 1660
Longitud extension max	mm. 2030
Longitud doblada	mm. 1195
Anchura	mm. 430
Espesor de la camilla Doblada	mm. 85
Peso	Kg. 9
Alcance	Kg. 150

Construit en aluminium anodisé, résistant aux corrosions et robuste pour garantir la résistance et la légèreté du brancard. Les tubes sont réalisés avec un diamètre suffisant pour supporter les sollicitations diverses.

Toutes les parties soumises à tension sont rivetées ensemble avec des rivets acier, les autres parties en rivets aluminium. Les fermetures sont fabriquées en fer forgé zingué et ne peuvent s'ouvrir accidentellement.

LES SPECIFICATIONS DE NOTRE BRANCARD CUILLERE 34103 SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES prEN 1865-97 ET TOUS LES ESSAIS TECHNIQUES ONT ETE EFFECTUES PAR UN ORGANISME NOTIFIE QUI DELIVRE EGALEMENT LES CERTIFICATS "CE".

UTILISATION

Pour mettre un blessé, ouvrir un ou les deux verrous qui se trouvent à chaque bout du brancard en poussant sur le bouton A. Ouvrir le brancard et glisser les deux parties de chaque côté sous le patient. A la fermeture des deux côtés enclencher les verrous comme indiquer fig. 2 et vérifier la bonne fermeture.

Pour régler la longueur tourner le petit levier B de 90° comme fig. 2 et tirer les deux tubes aussi loin que nécessaire, enclencher ensuite le levier B dans les trous de retenue.

Le brancard peut être rangé en position plat ou plié en deux. Pour plier le brancard, tirer au maximum les deux tubes et plier ensuite comme indiquer fig. 1.

Pour une utilisation correcte le brancard doit être soulevé par les poignées se trouvant de chaque côté du brancard et non pas par les tubes à ses extrémités. Ceci peut être dangereux pour le blessé et endommager le brancard.

Pour nettoyer le brancard on peut utiliser de l'eau et du savon et éventuellement un désinfectant approprié. A des intervalles régulières il est recommandé de huiler les deux tubes d'extension avec un peu de graisse de vaseline.

MISE EN GARDE: l'utilisation du brancard doit être faite par du personnel qualifié.